



הנחיות להזמנת כיסא שירותים ורחצה

יש שני סוגי כיסאות שירותים ורחצה – בהנעה עצמית או על ידי מלווה.

כס"ר בהנעה עצמית:

כיסא שירותים ורחצה בעל גלגלים אחוריים הדומים לכיסא גלגלים פריק ומאפשרים למשתמש עצמאות בעת השימוש בכס"ר.

הנחיות מדידה לפני הספקה:

- גובה תחתית הניאגרה עד הריצפה חייב להיות מעל 95 ס"מ, על מנת שידיות ההובלה לא יפריעו לכניסת הכס"ר למרכז האסלה (ראה תמונה מס' 1).
- נחוץ מרווח של 15 ס"מ לכל הפחות בין האסלה לקיר הצידי (ראה תמונה מס' 2)
- יש לוודא שצינור הניקוז (ביוב) אינו יוצא לצד האסלה, אלה מאחור.
- במידה ויש צינור ניקוז צידי – אנו נזדקק ל 50 ס"מ לכל הפחות מקצה הצינור ועד מרכז אסלה (ראה תמונה מס' 3).
- בכל מקרה, נזדקק ל 50 ס"מ מרווח ממרכז האסלה לקיר אחורי (ראה תמונה מס' 3)
- יש לוודא שגובה האסלה אינו עולה על 41 ס"מ (ראה ציור מס' 2).

כס"ר בהנעה על ידי מלווה:

כיסא שירותים ורחצה המונע על ידי מלווה, באמצעות הסעת הכיסא על ידי איש עזר סיעודי.

הנחיות מדידה לפני הספקה:

- גובה תחתית הניאגרה עד הריצפה חייב להיות מעל 95 ס"מ, על מנת שידיות ההובלה לא יפריעו לכניסת הכס"ר למרכז האסלה (ראה תמונה מס' 1).
- אנו נזדקק למעבר של 7 ס"מ לכל הפחות בין האסלה לקיר הצידי (ראה תמונה מס' 2)
- אנו זקוקים ל 40 ס"מ עומק, ממרכז האסלה לקיר האחורי – (ראה תמונה מס' 3)
- גובה סטנדרטי של אסלה הוא עד 41 ס"מ – (ראה תמונה מס' 2)
- גובה כיסא סטנדרטי (כולל מסילות מתחת למושב וכלי פלסטיק לאיסוף צרכים) ינוע בין 47 ס"מ ל 49 ס"מ.





תמונה מס' 1



תמונה מס' 2



תמונה מס' 3

